

Tecom

IMPLANTOLOGY

PRODUTTORI DI SISTEMI IMPLANTARI COMPATIBILI

Disponiamo di oltre duemila prodotti compatibili con i più rinomati marchi di implantologia, offrendo componenti protesici e di laboratorio, strumenti e sistemi implantari completi.

COMPATIBLE IMPLANT SYSTEMS MANUFACTURER

We have over two thousand products compatible with the most renowned implantology brands, offering prosthetic and laboratory components, instruments and complete implant systems.

CC SYSTEM	Compatibile con	Sistema implantare NobelActive® prodotto da Nobel Biocare™ Sistema implantare NobelParallel™ Conical Connection prodotto da Nobel Biocare™ Sistema implantare NobelReplace® Conical Connection prodotto da Nobel Biocare™
BRANE	Compatibile con	Sistema implantare Brånemark System® e NobelSpeedy® Groovy prodotto da Nobel Biocare™
BRANE-Z VITI ZIGOMATICHE	Compatibile con	Brånemark System Zygoma™ Machined prodotto da Nobel Biocare™
FRIA	Compatibile con	Sistema implantare Xive® S prodotto da Dentsply Syrona®
MINI-IMPIANTO	Ispirato a	mini impianti monofasici prodotti da Intra-Lock®
PT	Compatibile con	Sistema implantare Pitt-Easy® prodotto da Sybron Implant Solutions (ora distribuito come SyEasy da Simpla®)
REP	Compatibile con	Sistemi implantari NobelReplace® Straight e Tapered e con Replace Select™ Tapered prodotti da Nobel Biocare™
SCREW	Compatibile con	Sistema implantare Screw-Vent® prodotto da Zimmer®
STR	Compatibile con	Sistema implantare Straumann® Tissue Level prodotto da Straumann®
STR BL	Compatibile con	Sistema implantare Straumann® Bone Level prodotto da Straumann®

I marchi e i produttori sopracitati sono menzionati al solo fine di fornire informazioni in merito alla compatibilità dei prodotti Tecom Implantology® con gli originali di riferimento. Non vi è alcuna relazione imprenditoriale e/o commerciale fra Titanmed Srl e i produttori sopracitati.

Titanmed Srl è proprietaria esclusivamente del marchio Tecom Implantology® e non ha alcun diritto sugli altri marchi menzionati.

The aforementioned brands and manufacturers are mentioned for the sole purpose of providing information about the compatibility of Tecom Implantology® products with the reference original products. There is no entrepreneurial and/or commercial relationship between Titanmed Srl and the aforementioned manufacturers. Titanmed Srl owns exclusively the Tecom Implantology® trademark and has no rights to the other mentioned brands.

INDICE

INDEX


Caratteristiche del sistema implantare PT PT implant system features	pag.4
Preparazione sito impantare e posizionamento impianto Implant site preparation and implant positioning	pag. 6
- Impianti - Implants	
Presca d'impronta Impression taking	pag. 8
- Componenti da laboratorio - Lab components	
Protesizzazione Prosthetic workflow	pag. 10
- Parti protesiche - Prosthetic parts	
Mua (multi unit abutment) per overdenture Mua (multi unit abutment) for overdenture	pag. 14
- MUA - MUA - Componenti da laboratorio per MUA - MUA Lab components - Parti protesiche per MUA - MUA Prosthetic parts	
Strumentario Tools	pag. 19

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA IMPIANTARE PT

PT IMPLANT SYSTEM FEATURES

IMPIANTO IMPLANT

PT

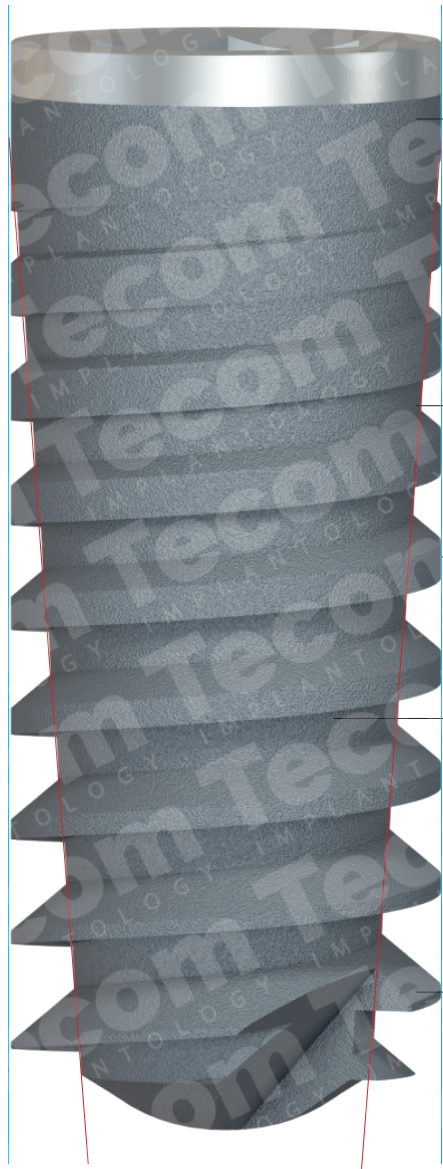

L'assenza di spire sul collarino permette un'ottima stabilità primaria

The absence of threads on the neck allows excellent primary stability

Nocciolo conico
Tapered core

Filetto cilindrico
Cylindric threads shape

Trattamento di superficie SL Titanmed, compatibile con i migliori trattamenti SLA™
SL Titanmed surface treatment, compatible with the best SLA™ treatments

Spire molto accentuate all'apice
Garantiscono grande capacità maschiante
Accentuated threads shape at the apex for an easy tapping

TRATTAMENTO SL SL SURFACE TREATMENT

Il trattamento SL Titanmed è tecnicamente comparabile ai migliori SLA™ maggiormente documentati in letteratura. Viene realizzato con una tecnica di sabbiatura con una tecnologia che permette la massima costanza di trattamento. A questa segue la mordenzatura con soluzioni acide. La sabbiatura genera sulla superficie dell'impianto una macrorugosità, a cui si sovrappone una micro-rugosità ottenuta tramite il processo di mordenzatura acida. La topografia superficiale che ne deriva genera la struttura idonea all'ancoraggio delle cellule osteoblaste e favorisce un'ottima integrazione dell'impianto con il tessuto osseo.

The Titanmed SL treatment is comparable with the best SLA™ treatments, documented in scientific journals. It is realized using sand-blasting technique with a technology which allows the maximum consistency of treatment. After this, the surface is etched with acid solutions. The sand-blasting step creates a macro roughness on the surface of the implant, then a micro roughness is formed on top of these with the acid etching process. The resulting texture of the surface generates a structure that is suitable for anchoring osteoblast cells, favouring the optimal integration of the implant with the bone tissue.

MATERIALE MATERIAL

Il titanio Grado 4 per uso medicale di primissima qualità, proveniente esclusivamente dagli U.S.A. viene utilizzato per la realizzazione degli impianti. Per tutti gli altri componenti viene utilizzato il titanio medicale Grado 5.

Premium grade 4 titanium for medical applications, sourced exclusively from the U.S.A., is used for implants manufacture. Grade 5 medical grade titanium is used for all other components.

VITE DI CONNESSIONE CONNECTING SCREW



Le viti di connessione delle parti protesiche nonostante abbiano stesso filetto e impronta possono essere, a seconda del diametro dell'impianto, differenti per lunghezza totale, altezza testa, inclinazione sottotesta, ecc.

***Ne esistono 5 e **NON** sono tra loro intercambiabili.
L'esagono delle viti di connessione e della vite tappo è da 1,68mm.
Tutte le viti hanno la stessa impronta esagonale fatto salvo le viti dei componenti MUA che hanno l'UNIGRIP.

The connecting screws of the prosthetic parts have the same thread and the same imprint may be different, depending on the diameter of the implant, in terms of overall length, head height, inclination under the head, etc.


***There are 5 of them and they are **NOT** interchangeable.
The hexagon of the connecting screws is 1.68mm.
All screws have the same hexagon dimension except for screws of MUA components that have UNIGRIP.

NOTE SUL SERRAGGIO RACCOMANDATO RECOMMENDED TORQUE NOTE

IMPIANTO IMPLANT	50 Ncm
VITE TAPPO COVER SCREW	15 Ncm
COMPONENTI DA LABORATORIO LAB COMPONENTS	5-10 Ncm
PARTI PROTESICHE PROSTHETIC PARTS	30 Ncm
MUA MUA	30 Ncm
MUA COMPONENTI DA LABORATORIO MUA LAB COMPONENTS	5-10 Ncm
MUA PARTI PROTESICHE MUA PROSTHETIC PARTS	15 Ncm

PREPARAZIONE SITO IMPANTARE E POSIZIONAMENTO IMPIANTO

IMPLANT SITE PREPARATION AND IMPLANT POSITIONING

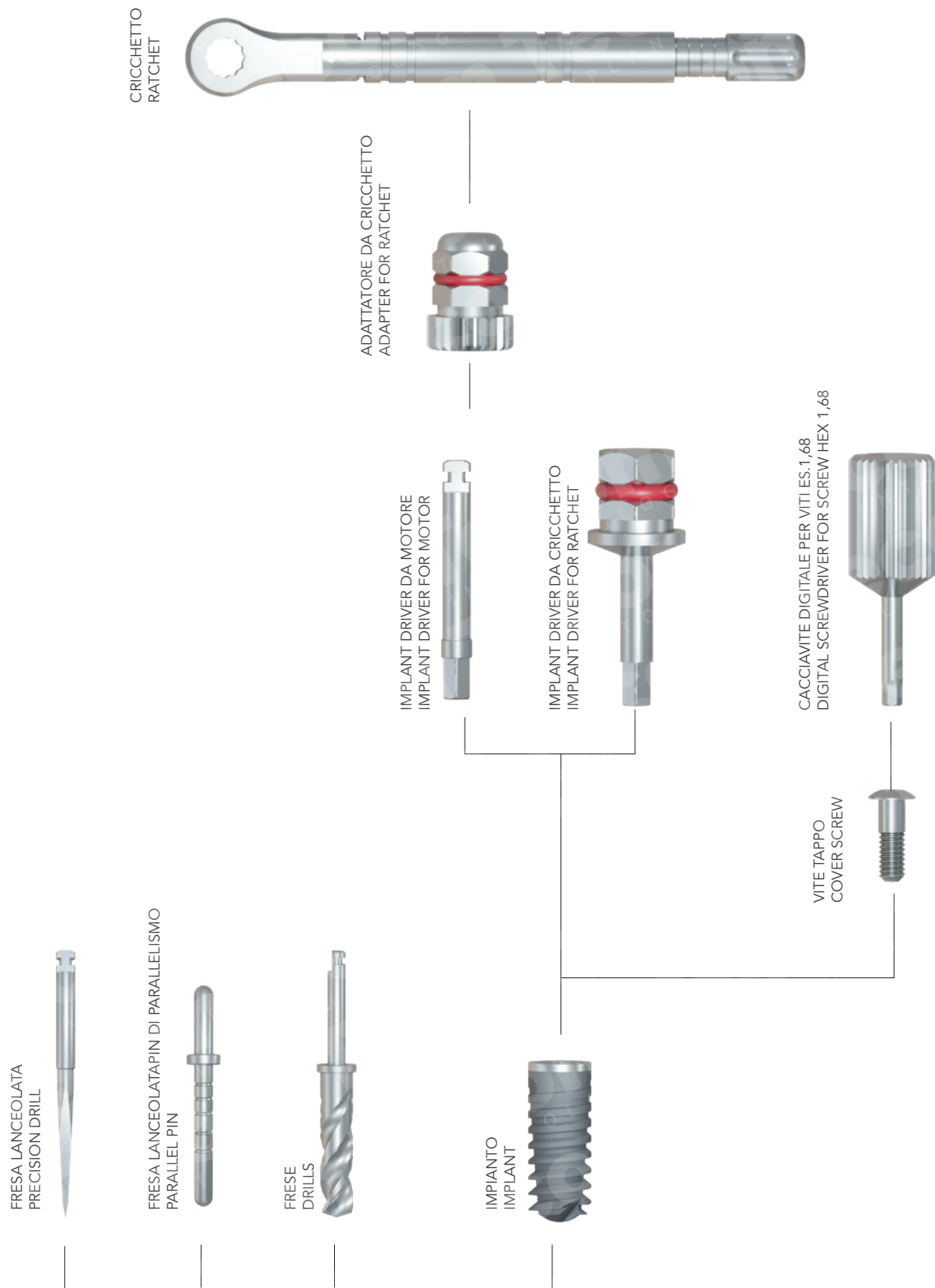


01 IMPIANTI IMPLANTS

PT

IMPIANTO PT Ø3.25
PT IMPLANT Ø3.25



Vite tappo inclusa anodizzata secondo codice colore
Cover screw included anodized according to color code

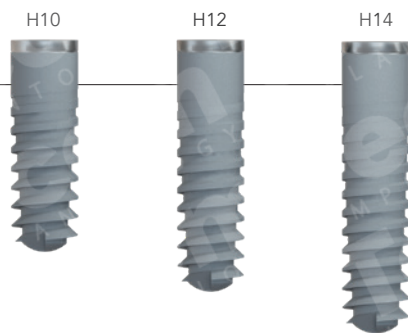

PT.IMP001


PT.IMP002

PT.IMP003

IMPIANTO PT Ø3.75
PT IMPLANT Ø3.75



Vite tappo inclusa anodizzata secondo codice colore
Cover screw included anodized according to color code

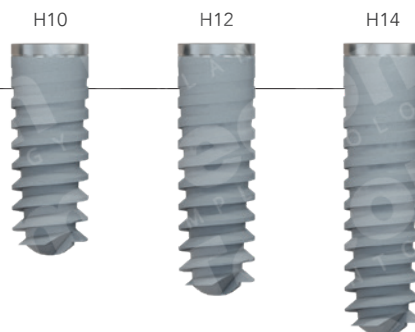

PT.IMP005


PT.IMP006

PT.IMP007

IMPIANTO PT Ø4.0
PT IMPLANT Ø4.0



Vite tappo inclusa anodizzata secondo codice colore
Cover screw included anodized according to color code

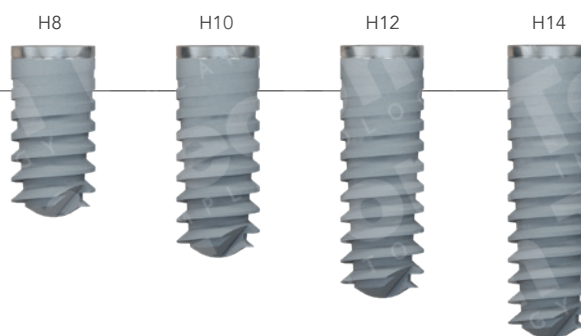

PT.IMP009

PT.IMP010


PT.IMP011

PT.IMP012

IMPIANTO PT Ø4.9
PT IMPLANT Ø4.9



Vite tappo inclusa anodizzata secondo codice colore
Cover screw included anodized according to color code

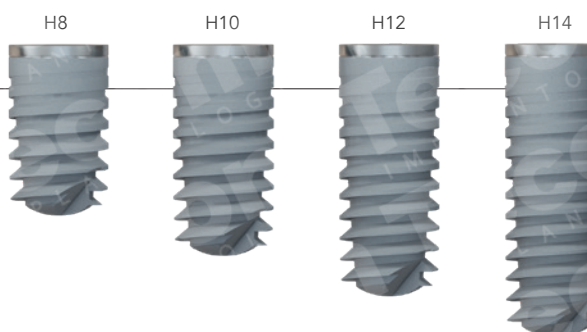

PT.IMP014

PT.IMP015

PT.IMP016

PT.IMP017

PRESA D'IMPRONTA IMPRESSION TAKING

CACCIAVITE DIGITALE PER VITI ES. 1.68
DIGITAL SCREW DRIVER FOR SCREWS HEX 1.68



TRANSFER
IMPRESSION COPING OPEN TRAY



IMPIANTO
IMPLANT



ANALOGO
IMPLANT REPLICA



02 COMPONENTI DA LABORATORIO LAB COMPONENTS

TRANSFER OPEN TRAY
IMPRESSION COPING OPEN TRAY



Ø	3,25	PT.PPR003
	3,75	PT.PPR014
	4	PT.PPR025
	4,9	PT.PPR047

Componente anodizzato secondo codice colore
Anodized component according to color code
Vite di connessione inclusa
Connecting screw included

ANALOGO
IMPLANT REPLICA



Ø	3,25	PT.IMP004
	3,75	PT.IMP008
	4	PT.IMP013
	4,9	PT.IMP018

Componente anodizzato secondo codice colore
Anodized component according to color code

PROTESIZZAZIONE PROSTHETIC WORKFLOW

CRICCHETTO
RATCHET



ADATTATORE DA CRICCHETTO
ADAPTER FOR RATCHET



DRIVER PER VITI ES. 1,68 DA MOTORE
DRIVER FOR SCREW HEX 1,68 FOR MOTOR



DRIVER PER VITI ES. 1,68 DA CRICCHETTO
DRIVER FOR SCREW HEX 1,68 FOR RATCHET



CACCIAVITE DIGITALE PER VITI ES. 1,68
DIGITAL SCREW DRIVER FOR SCREWS HEX 1,68



CAPPETTA AMMORTIZZO BASSA APERTA
DAMPING CAP LOW OPEN



CAPPETTA AMMORTIZZO ALTA CHIUSA
DAMPING CAP TALL CLOSED



**NON PRODUCIAMO
STRUMENTARIO PER OTK
OTK INSTRUMENTS ARE
NOT PRODUCED**

VITE DI GUARIGIONE
HEALING SCREW



TRANSMUCOSO
TRANSMUCOSAL



INCLINATO 15°
ANGLES 15°



INCLINATO 25°
ANGLES 25°



TBASE



SOVRAFUSIONE Cr/Co
CALCINABLE Cr/Co BASE



CALCINABILE
CALCINABLE



OTK
BALL ABUTMENT



IMPIANTO
IMPLANT



03 PARTI PROTESICHE PROSTHETIC PARTS

VITE DI GUARIGIONE HEALING SCREW



		H	
		2	4
∅	3,25	PT.VIT005	PT.VIT007
	3,75	PT.VIT009	PT.VIT010
	4	PT.VIT012	PT.VIT013
	4,9	PT.VIT015	PT.VIT016

Componente anodizzato secondo codice colore
Anodized component according to color code

MONCONE TRASMUCOSO TRANSMUCOSAL ABUTMENT



		H	
		1	2
∅	3,25	PT.PPR010	PT.PPR008
	3,75	PT.PPR015	PT.PPR016
	4	PT.PPR030	PT.PPR031
	4,9	PT.PPR035	PT.PPR036

Componente anodizzato secondo codice colore
Anodized component according to color code
Vite di connessione inclusa
Connecting screw included

MONCONE ESTETICO INCLINATO 15° 15° ANGLED AESTHETIC ABUTMENT



		H
		1
∅	3,25	PT.PPR009
	3,75	PT.PPR021
	4	PT.PPR032

Componente anodizzato secondo codice colore
Anodized component according to color code
Vite di connessione inclusa
Connecting screw included

MONCONE ESTETICO INCLINATO 25° 25° ANGLED AESTHETIC ABUTMENT



		H
		1
∅	3,75	PT.PPR075
	4	PT.PPR076

Componente anodizzato secondo codice colore
Anodized component according to color code
Vite di connessione inclusa
Connecting screw included

MONCONE TBase
TBase ABUTMENT

∅	3,75	PT.PPR078
	4	PT.PPR077



Componente anodizzato secondo codice colore
Anodized component according to color code
Vite di connessione inclusa
Connecting screw included

Fornito senza Scanbody. Per il rilevamento di posizione con scanner intraorale, il moncone TBase è compatibile con la misura Large degli Scanbody Sirona™ Cerec.
Scanbody not included. For digital impression with intraoral scanner, the TBase is compatible with Scanbody Sirona™ Cerec, size Large.

MONCONE SOVRAFUSIONE NON ROTANTE Cr/Co
NON ROTATING Cr/Co BASE CALCINABLE ABUTMENT

∅	3,25	PT.PPR084
	3,75	PT.PPR081
	4	PT.PPR083
	4,9	PT.PPR085



Vite di connessione inclusa anodizzata secondo codice colore
Connecting screw included anodized according to color code

MONCONE CALCINABILE NON ROTANTE
NON ROTATING CALCINABLE ABUTMENT

∅	3,25	PT.PPR001
	3,75	PT.PPR022
	4	PT.PPR026
	4,9	PT.PPR041



MONCONE A PALLINA (OTK)
BALL ABUTMENT (OTK)

		H	
		2	4
∅	3,25	PT.PPR002	/
	3,75	PT.PPR023	PT.PPR024
	4	PT.PPR033	PT.PPR034
	4,9	PT.PPR042	PT.PPR048



Componente anodizzato secondo codice colore
Anodized component according to color code

CAPETTA AMMORTIZZO BASSA APERTA IN
TITANIO CON O-RING
TITANIUM DAMPING CAP LOW, OPEN WITH O-RING

PT.PPR050



O-RING CONFEZIONE 10 PZ.
O-RING 10 PCS PACK

PT.PPR052

CAPETTA AMMORTIZZO ALTA CHIUSA IN
TITANIO CON O-RING
TITANIUM DAMPING CAP TALL, CLOSED WITH O-RING

PT.PPR051



O-RING CONFEZIONE 10 PZ.
O-RING 10 PCS PACK

PT.PPR052


BARRETTA DI SALDATURA (10 PZ.)
WELDING BAR (10 PCS)



	1.2	VARPPR006
∅	1.5	VARPPR005
	2	VARPPR004

MUA (MULTI UNIT ABUTMENT) PER OVERDENTURE - POSIZIONAMENTO

MUA (MULTI UNIT ABUTMENT) FOR OVERDENTURE - POSITIONING

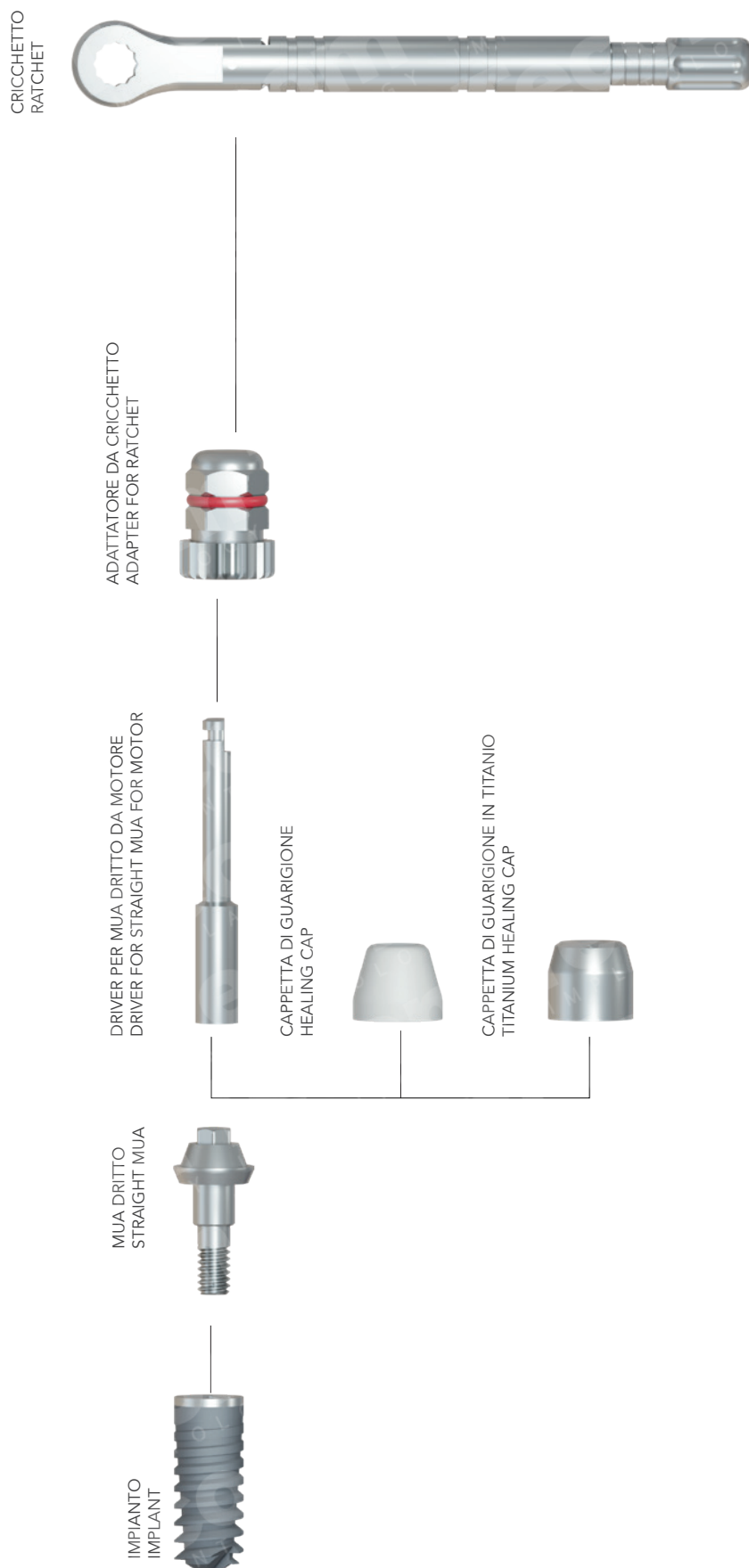

MUA PER OVERDENTURE - PRESA D'IMPRONTA

MUA FOR OVERDENTURE - IMPRESSION TAKING

CRICCHETTO
RATCHET



ADATTATORE DA CRICCHETTO
ADAPTER FOR RATCHET



CACCIAVITE DIGITALE TIPO UNIGRIP™
DIGITAL SCREWDRIVER UNIGRIP™



DRIVER UNIGRIP™ DA MOTORE
DRIVER UNIGRIP™ FOR MOTOR



DRIVER UNIGRIP™ DA CRICCHETTO
DRIVER UNIGRIP™ FOR RATCHET



TRANSFER PER MUA
MUA IMPRESSION COPING



MUA DRITTO
STRAIGHT MUA



ANALOGO PER MUA
MUA REPLICA




IMPIANTO
IMPLANT



MUA PER OVERDENTURE - PROTESIZZAZIONE

MUA FOR OVERDENTURE - PROSTHETIC WORKFLOW

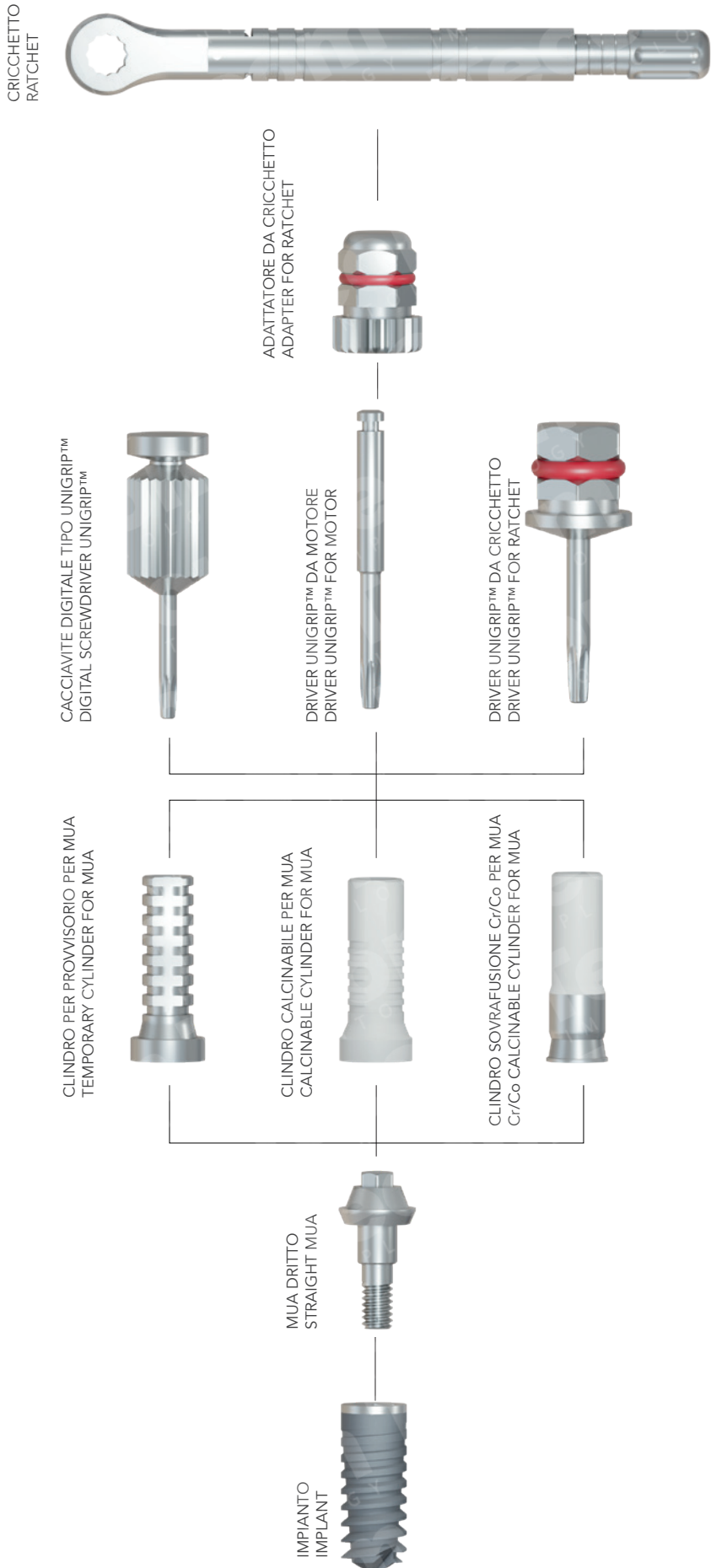

04 MUA MUA

MUA DRITTO
STRAIGHT MUA



		H		
		1	3	4
Ø	4	PT.PPR057	/	PT.PPR056
	4,9	/	PT.PPR055	/

05 COMPONENTI DA LABORATORIO MUA MUA LAB COMPONENTS

TRANSFER PER MUA CON VITE L 15
IMPRESSION COPING FOR MUA WITH SCREW L 15

BRAPPR087



VITE DI CONNESSIONE L 20 per transfer per MUA
CONNECTING SCREW L 20 for impression coping for MUA

BRAVIT042

ANALOGO PER MUA
MUA REPLICA



BRAPPR077

06 PARTI PROTESICHE MUA MUA PROSTHETIC PARTS

CAPPETTA DI GUARIGIONE IN TITANIO PER MUA
TITANIUM HEALING CAP FOR MUA



BRAPPR141

Vite di connessione inclusa
Connecting screw included

CAPPETTA DI GUARIGIONE PER MUA
HEALING CAP FOR MUA



BRAPPR097

Vite di connessione inclusa
Connecting screw included

CILINDRO PER PROVVISORIO PER MUA
TEMPORARY CYLINDER FOR MUA



BRAPPR086

Vite di connessione inclusa
Connecting screw included

CILINDRO SOVRAFUSIONE PER MUA Cr/Co
Cr/Co BASE FOR MUA CALCINABLE ABUTMENT



BRAPPR137

Vite di connessione inclusa
Connecting screw included

CILINDRO CALCINABILE PER MUA
CALCINABLE PLASTIC CYLINDER FOR MUA



BRAPPR108

Vite di connessione inclusa
Connecting screw included

07 STRUMENTARIO TOOLS



FRESA LANCEOLATA
PRECISION DRILL

VARSTR084



FRESA PILOTA
PILOT DRILL

Ø reale fresa - Real Ø drill

		1,6	1,8	2
Ø	3,25	PT.STR007	PT.STR008	PT.STR009
	3,75	PT.STR007	PT.STR008	PT.STR009
	4	PT.STR007	PT.STR008	PT.STR009
	4,9	PT.STR007	PT.STR008	PT.STR009



PIN DI PARALLELISMO
PARALLEL PIN

Ø 2/2,7 SF0STR122

Dotato di tacche di profondità per impianti H 6 - 8,5 - 10 - 11,5 - 13 - 15

Depth indicator for implants H 6 - 8,5 - 10 - 11,5 - 13 - 15



PROTOCOLLO DI FRESAGGIO PER TUTTI I TIPI DI OSSO
DRILLING PROTOCOL FOR ALL BONES

Ø reale fresa - Real Ø drill

		2,8	3,1	3,5	3,75	4,25	4,65
Ø	3,25	SCRSTR007	PT.STR005	/	/	/	/
	3,75	/	/	PT.STR006	/	/	/
	4	/	/	/	PT.STR029	/	/
	4,9	/	/	/	/	BRASTR037	PT.STR013



IMPLANT DRIVER DA MOTORE
IMPLANT DRIVER FOR MOTOR

		L	
		20	
∅	3,25	PT.STR030	
	3,75	PT.STR030	

ADATTATORE DA CRICCHETTO PER DRIVER MOTORE
ADAPTER FOR RATCHET FOR MOTOR TOOLS



VARSTR020

Consente di utilizzare tutti i driver motore con i cricchetti Titanmed
This adapter allows to use all the drivers for motor with Titanmed ratchets

IMPLANT DRIVER DA CRICCHETTO
IMPLANT DRIVER FOR RATCHET



		L	
		12	17
∅	3,25	PT.STR018	PT.STR019
	3,75	PT.STR018	PT.STR019
	4	PT.STR020	PT.STR021
	4,9	PT.STR020	PT.STR021

Utilizzabile solo con cricchetti Titanmed
It can be used only with Titanmed ratchets

CACCIAVITE DIGITALE PER VITI ES. 1,68
DIGITAL SCREWDRIVER FOR SCREWS HEX. 1,68



		L	
		10	15
		PT.STR010	PT.STR011



DRIVER PER VITI ES. 1,68 DA MOTORE
DRIVER FOR SCREWS HEX. 1,68 FOR MOTOR

L

26	32
PT.STR022	PT.STR023



DRIVER PER VITI ES. 1,68 DA CRICCHETTO
DRIVER FOR SCREWS HEX. 1,68 FOR
RATCHET

L

12	17
PT.STR016	PT.STR017

Utilizzabile solo con cricchetti Titanmed
It can be used only with Titanmed ratchets



DRIVER PER MUA DRITTO DA MOTORE
DRIVER FOR STRAIGHT MUA FOR MOTOR

L

25
BRASTR046



CACCIAVITE DIGITALE TIPO UNIGRIP™
DIGITAL SCREWDRIVER UNIGRIP™ TYPE

L

12	17
BRASTR004	BRASTR015



PROLUNGA PER FRESE
DRILL EXTENDER

VARSTR032



DRIVER TIPO UNIGRIP™ DA MOTORE
DRIVER UNIGRIP™ TYPE FOR MOTOR

L	
26	32
BRASTR001	BRASTR027



DRIVER TIPO UNIGRIP™ DA CRICCHETTO
DRIVER UNIGRIP™ TYPE FOR RATCHET

L	
12	17
BRASTR057	BRASTR058

Utilizzabile solo con cricchetti Titanmed
It can be used only with Titanmed ratchets



CRICCHETTO DINAMOMETRICO
TITANMED
DYNAMOMETRIC TITANMED RATCHET

VARSTR053

Utilizzabile solo con driver Titanmed
It can be used only with Titanmed driver



CRICCHETTO FISSO TITANMED
FIXED TITANMED RATCHET

VARSTR069

Utilizzabile solo con driver Titanmed
It can be used only with Titanmed driver



CACCIAVITE MANUALE PER STRUMENTI A CRICCHETTO
MANUAL SCREWDRIVER FOR RATCHETS INSTRUMENTS

L
170
VARSTR085

Utilizzabile solo con driver Titanmed
It can be used only with Titanmed driver



CONTATTI

TITANMED S.r.l.

Sede amministrativa e operativa:
Via Piedimonte 8/B
23868 Valmadrera (LC) - Italia

Tel: 0039 0341 363504
Email: ordini@tecomimplantology.com

CONTACTS

TITANMED S.r.l.

Administrative and operational location:
Via Piedimonte 8/B
23868 Valmadrera (LC) - Italia

Tel: 0039 0341 363504
Email: orders@tecomimplantology.com

Titanmed

Leading to perfection

www.titanmed.it
www.tecomimplantology.com