

FRIA
Catalogo/Catalogue

Tecom

IMPLANTOLOGY

PRODUTTORI DI SISTEMI IMPLANTARI COMPATIBILI

Disponiamo di oltre duemila prodotti compatibili con i più rinomati marchi di implantologia, offrendo componenti protesici e di laboratorio, strumenti e sistemi implantari completi.

COMPATIBLE IMPLANT SYSTEMS MANUFACTURER

We have over two thousand products compatible with the most renowned implantology brands, offering prosthetic and laboratory components, instruments and complete implant systems.

CC SYSTEM	Compatibile con	Sistema implantare NobelActive® prodotto da Nobel Biocare™ Sistema implantare NobelParallel™ Conical Connection prodotto da Nobel Biocare™ Sistema implantare NobelReplace® Conical Connection prodotto da Nobel Biocare™
BRANE	Compatibile con	Sistema implantare Brånemark System® e NobelSpeedy® Groovy prodotto da Nobel Biocare™
BRANE-Z VITI ZIGOMATICHE	Compatibile con	Brånemark System Zygoma™ Machined prodotto da Nobel Biocare™
FRIA	Compatibile con	Sistema implantare Xive® S prodotto da Dentsply Syrona®
MINI-IMPIANTO	Ispirato a	mini impianti monofasici prodotti da Intra-Lock®
PT	Compatibile con	Sistema implantare Pitt-Easy® prodotto da Sybron Implant Solutions (ora distribuito come SyEasy da Simpla®)
REP	Compatibile con	Sistemi implantari NobelReplace® Straight e Tapered e con Replace Select™ Tapered prodotti da Nobel Biocare™
SCREW	Compatibile con	Sistema implantare Screw-Vent® prodotto da Zimmer®
STR	Compatibile con	Sistema implantare Straumann® Tissue Level prodotto da Straumann®
STR BL	Compatibile con	Sistema implantare Straumann® Bone Level prodotto da Straumann®

I marchi e i produttori sopracitati sono menzionati al solo fine di fornire informazioni in merito alla compatibilità dei prodotti Tecom Implantology® con gli originali di riferimento. Non vi è alcuna relazione imprenditoriale e/o commerciale fra Titanmed Srl e i produttori sopracitati.

Titanmed Srl è proprietaria esclusivamente del marchio Tecom Implantology® e non ha alcun diritto sugli altri marchi menzionati.

The aforementioned brands and manufacturers are mentioned for the sole purpose of providing information about the compatibility of Tecom Implantology® products with the reference original products. There is no entrepreneurial and/or commercial relationship between Titanmed Srl and the aforementioned manufacturers. Titanmed Srl owns exclusively the Tecom Implantology® trademark and has no rights to the other mentioned brands.

INDICE

INDEX

Caratteristiche del sistema implantare FRIA FRIA implant system features	pag. 4
Preparazione sito impantare e posizionamento impianto Implant site preparation and implant positioning	pag. 7
- Impianti - Implants	
Presca d'impronta Impression taking	pag. 10
- Componenti da laboratorio - Lab components	
Protesizzazione Prosthetic workflow	pag. 12
- Parti protesiche - Prosthetic parts	
Mua (multi unit abutment) per overdenture Mua (multi unit abutment) for overdenture	pag. 17
- MUA - MUA - Componenti da laboratorio per MUA - MUA Lab components - Parti protesiche per MUA - MUA Prosthetic parts	
Strumentario Tools	pag. 23

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA IMPIANTARE FRIA FRIA IMPLANT SYSTEM FEATURES

FRIA

FRIA.2 IMPIANTO con portatore FRIA.2 IMPLANT with mounter



Dotato di portatore per facilitarne l'inserimento in sito. Per tutti i diametri ha un esagono da 2,2 mm e ha una sua vite di connessione.

Supplied with a mounter for easy insertion in situ. For all diameters it has a 2.2 mm hexagon and has its own connecting screw.

Platform switching mantiene osso crestale migliora la condizione dei tessuti molli.

Connessione interna con un esagono antirotazionale.

Platform switching maintains crestal bone improves soft tissue condition.

Internal connection with an anti-rotational hexagon.

Troncoconico con due tipi di filetto a 1 principio, quando aumenta la lunghezza dell'impianto aumentano proporzionalmente la lunghezza della punta conica e il tratto cilindrico di filetto principale

Troncoconical with two 1-principle thread types, when the length of the implant increases, the length of the conical tip and the cylindrical section of the main thread increase proportionally


Tattamento di superficie SL Titanmed, compatibile con i migliori trattamenti SLA™

SL Titanmed surface treatment, compatible with the best SLA™ treatments

Filettatura apicale autoguidante evita necessità di pre-maschiatura

Apical cutting part used as anti-rotational system

FR2 IMPIANTO senza portatore FR2 IMPLANT without mounter

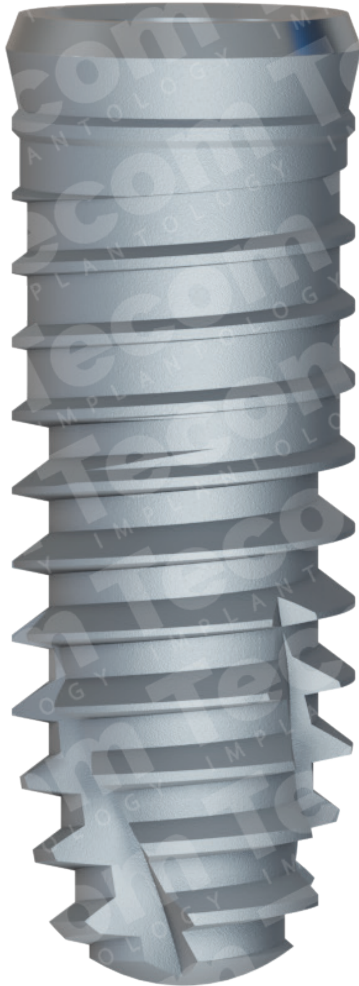

ATTENZIONE: WARNING:

Gli impianti senza portatore necessitano di implant driver con o-ring ritentivo di Titanmed.

Gli implant driver da cricchetto non hanno l'o-ring ritentivo e quindi non possono essere utilizzati per il posizionamento dell'impianto in sito.

Implants without mounter require implant drivers with a retentive o-ring produced by Titanmed.

Ratchet implant drivers do not have the retention o-ring and therefore cannot be used for implant placement on site.

MATERIALE MATERIAL

Il titanio Grado 4 per uso medico di primissima qualità, proveniente esclusivamente dagli U.S.A. viene utilizzato per la realizzazione degli impianti. Per tutti gli altri componenti viene utilizzato il titanio medico Grado 5.

Premium grade 4 titanium for medical applications, sourced exclusively from the U.S.A. is used for implants manufacture. Grade 5 medical grade titanium is used for all other components.

TRATTAMENTO DI SUPERFICIE SL TITANMED SL TITANMED SURFACE TREATMENT

Il trattamento SL Titanmed è tecnicamente comparabile ai migliori SLA™ maggiormente documentati in letteratura. Viene realizzato con una tecnica di sabbiatura con una tecnologia che permette la massima costanza di trattamento. A questa segue la mordenzatura con soluzioni acide. La sabbiatura genera sulla superficie dell'impianto una macrorugosità, a cui si sovrappone una micro-rugosità ottenuta tramite il processo di mordenzatura acida. La topografia superficiale che ne deriva genera la struttura idonea all'ancoraggio delle cellule osteoblaste e favorisce un'ottima integrazione dell'impianto con il tessuto osseo.

The Titanmed SL treatment is comparable with the best SLA™ treatments, documented in scientific journals. It is realized using sand-blasting technique with a technology which allows the maximum consistency of treatment. After this, the surface is etched with acid solutions. The sand-blasting step creates a macro roughness on the surface of the implant, then a micro roughness is formed on top of these with the acid etching process. The resulting texture of the surface generates a structure that is suitable for anchoring osteoblast cells, favouring the optimal integration of the implant with the bone tissue.

VITE DI CONNESSIONE CONNECTING SCREW



Le viti di connessione delle parti protesiche nonostante abbiano, a seconda del diametro dell'impianto, stesso filetto e impronta possono essere differenti per lunghezza totale, altezza testa, inclinazione sottotesta, ecc.


The connecting screws of the prosthetic parts, although they have, depending on the diameter of the implant, the same thread and the same imprint, may be different in terms of overall length, head height, inclination under the head, etc.

NOTE SUL SERRAGGIO RACCOMANDATO RECOMMENDED TORQUE NOTE

IMPIANTO IMPLANT	torque massimo 50 Ncm nel portatore torque massimo 70 Ncm direttamente nella connessione dell'impianto maximum torque 50 Ncm in the moulder maximum torque 70 Ncm directly in the implant connection
VITE TAPPO COVER SCREW	15 Ncm
COMPONENTI DA LABORATORIO LAB COMPONENTS	5-10 Ncm
PARTI PROTESICHE PROSTHETIC PARTS	30 Ncm
MUA MUA	30 Ncm
MUA COMPONENTI DA LABORATORIO MUA LAB COMPONENTS	5-10 Ncm
MUA PARTI PROTESICHE MUA PROSTHETIC PARTS	15 Ncm

PREPARAZIONE SITO IMPANTARE E POSIZIONAMENTO IMPIANTO

IMPLANT SITE PREPARATION AND IMPLANT POSITIONING

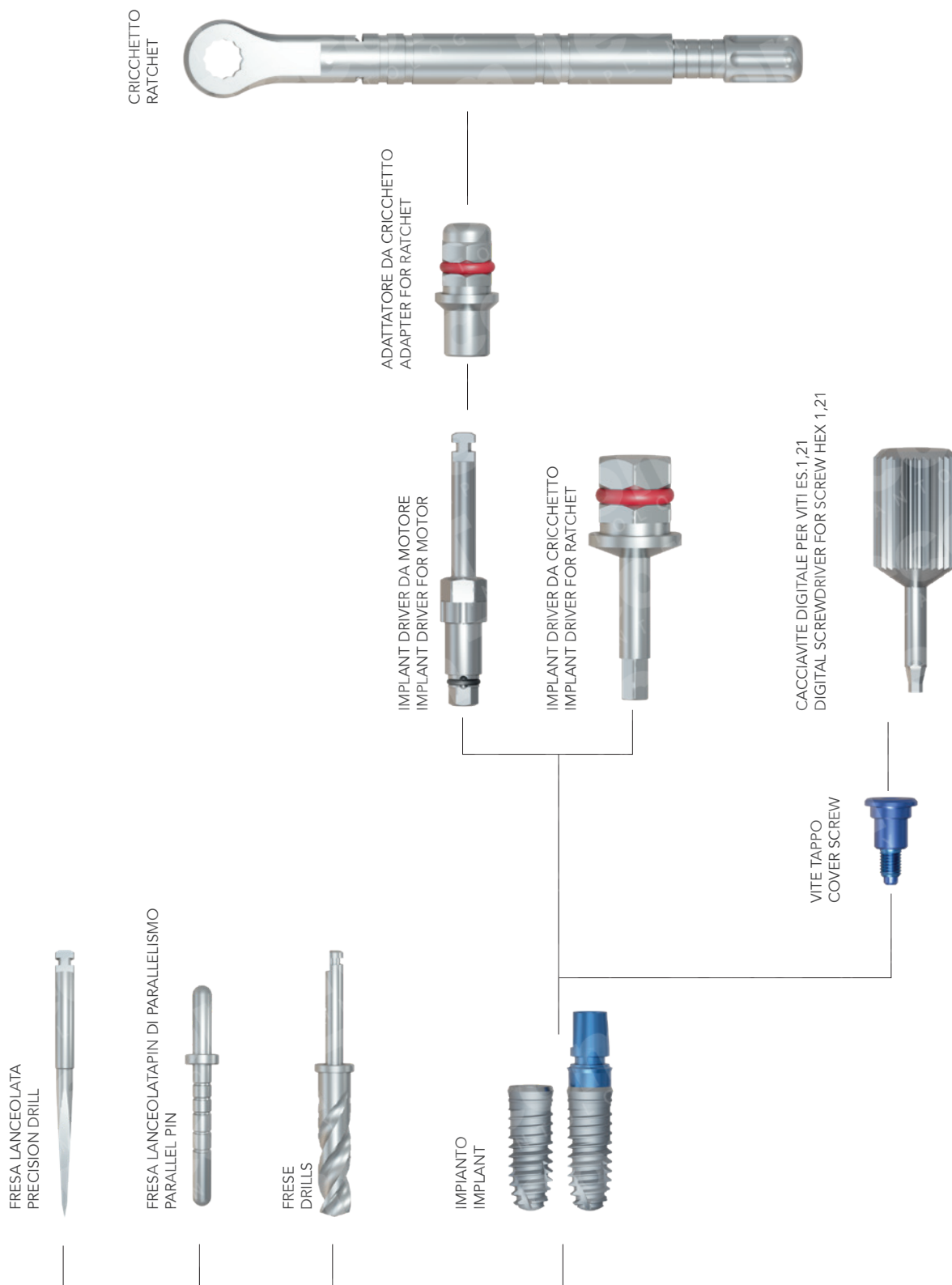

01 IMPIANTI FRIA.2 IMPLANTS FRIA.2


IMPIANTO FRIA.2 Ø3.4 FRIA.2 IMPLANT Ø3.4

Vite tappo inclusa.
Cover screw included.
Venduto incluso di portatore anodizzata secondo codice colore.
It is supplied with a mounter anodized according to color code.

H9,5

H11

H13

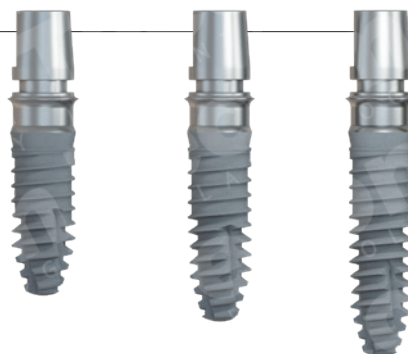

FP2IMP001

FP2IMP002

FP2IMP003

IMPIANTO FRIA.2 Ø3.8 FRIA.2 IMPLANT Ø3.8


Vite tappo inclusa.
Cover screw included.
Venduto incluso di portatore anodizzata secondo codice colore.
It is supplied with a mounter anodized according to color code.

H8

H9,5

H11

H13

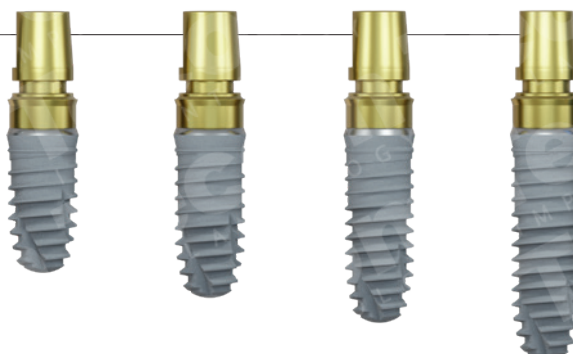

FP2IMP004

FP2IMP005

FP2IMP006

FP2IMP007

IMPIANTO FRIA.2 Ø4.5 FRIA.2 IMPLANT Ø4.5

Vite tappo inclusa.
Cover screw included.
Venduto incluso di portatore anodizzata secondo codice colore.
It is supplied with a mounter anodized according to color code.


H8

H9,5

H11

H13

H15

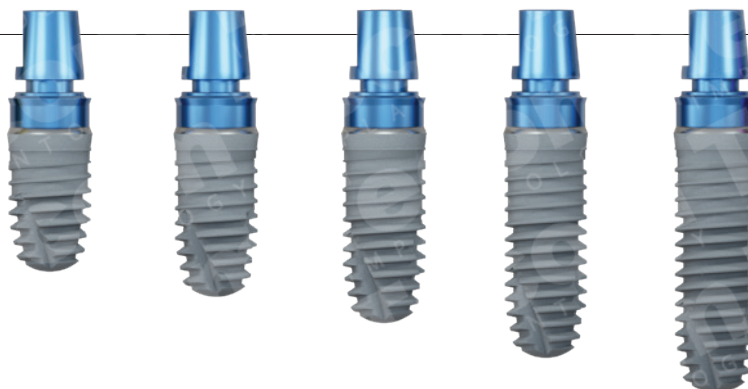

FP2IMP008

FP2IMP009

FP2IMP010

FP2IMP011

FP2IMP012

IMPIANTO FRIA.2 Ø5.5 FRIA.2 IMPLANT Ø5.5


Vite tappo inclusa.
Cover screw included.
Venduto incluso di portatore anodizzata secondo codice colore.
It is supplied with a mounter anodized according to color code.

H8

H9,5

H11

H13

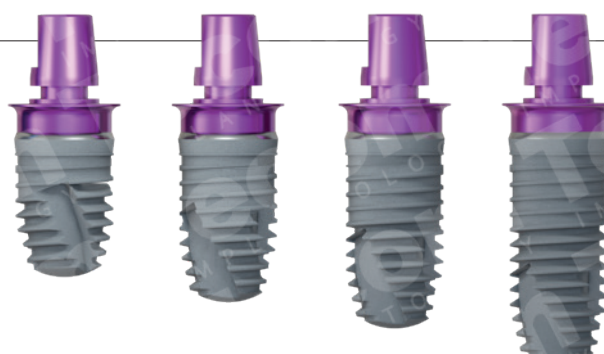

FP2IMP013

FP2IMP014

FP2IMP015

FP2IMP016

01 IMPIANTI FR2 IMPLANTS FR2

IMPIANTO FR2 Ø3.4
FR2 IMPLANT Ø3.4

Vite tappo inclusa.
Cover screw included.

H9,5

H11

H13



FR2IMP001

FR2IMP002

FR2IMP003

IMPIANTO FR2 Ø3.8
FR2 IMPLANT Ø3.8

Vite tappo inclusa.
Cover screw included.

H8

H9,5

H11

H13



FR2IMP004

FR2IMP005

FR2IMP006

FR2IMP007

IMPIANTO FR2 Ø4.5
FR2 IMPLANT Ø4.5

Vite tappo inclusa.
Cover screw included.


H8

H9,5

H11

H13

H15

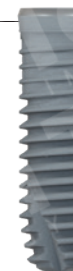

FR2IMP008

FR2IMP009

FR2IMP010

FR2IMP011

FR2IMP012

IMPIANTO FR2 Ø5.5
FR2 IMPLANT Ø5.5

Vite tappo inclusa.
Cover screw included.

H8

H9,5

H11

H13




FR2IMP013

FR2IMP014

FR2IMP015

FR2IMP016

PRESA D'IMPRONTA IMPRESSION TAKING

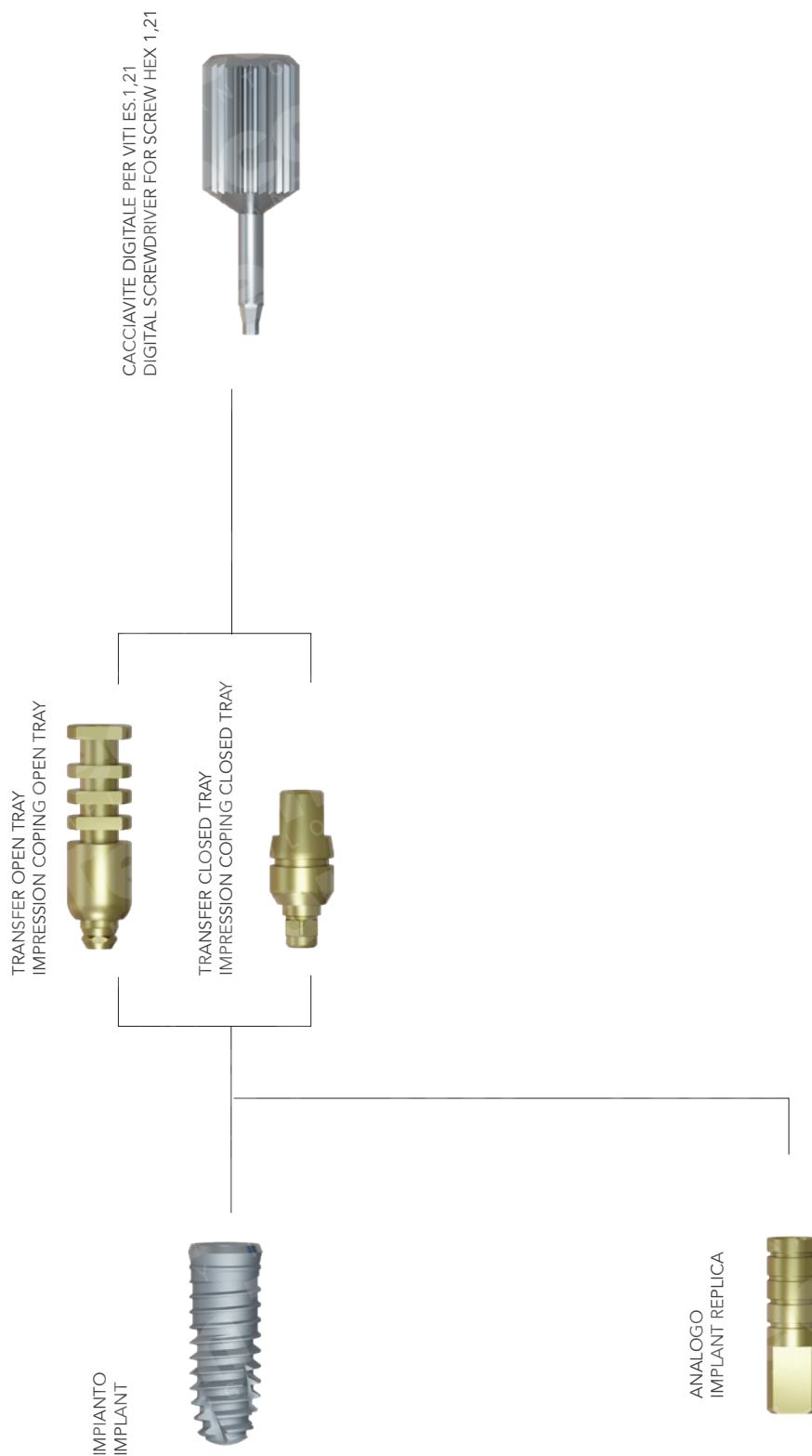

02 COMPONENTI DA LABORATORIO LAB COMPONENTS

TRANSFER OPEN TRAY
IMPRESSION COPING OPEN TRAY



	3,4	FRIPPR074
∅	3,8	FRIPPR075
	4,5	FRIPPR076

Componente anodizzato secondo codice colore
Anodized component according to color code
Vite di connessione inclusa
Connecting screw included

TRANSFER CLOSED TRAY
IMPRESSION COPING CLOSED TRAY



	3,4	FRIPPR002
	3,8	FRIPPR007
∅	4,5	FRIPPR017
	5,5	FRIPPR029

Componente anodizzato secondo codice colore
Anodized component according to color code
Vite di connessione inclusa
Connecting screw included


ANALOGO
IMPLANT REPLICA



	3,4	FRIIMP004
	3,8	FRIIMP009
∅	4,5	FRIIMP013
	5,5	FRIIMP014

Componente anodizzato secondo codice colore
Anodized component according to color code

PROTESIZZAZIONE PROSTHETIC WORKFLOW

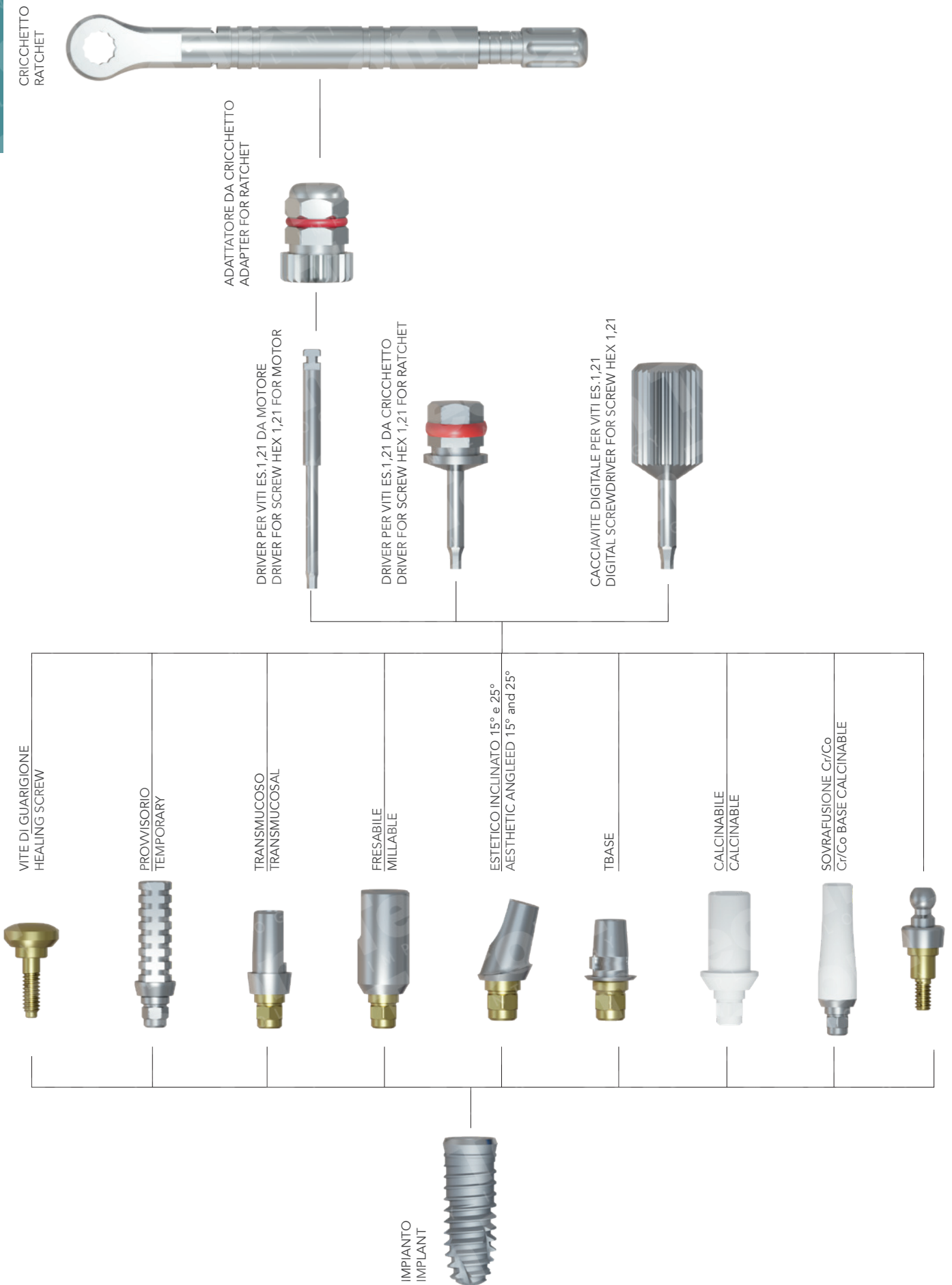

03 PARTI PROTESICHE PROSTHETIC PARTS

VITE DI GUARIGIONE

HEALING SCREW



		H		
		2	4	5
Ø	3,4	FRIVIT004	FRIVIT005	FRIVIT046
	3,8	FRIVIT007	FRIVIT008	FRIVIT048
	4,5	FRIVIT014	FRIVIT016	/
	5,5	FRIVIT018	FRIVIT019	/

Componente anodizzato secondo codice colore
Anodized component according to color code

MONCONE PROVVISORIO NON ROTANTE

TEMPORARY NON ROTATING ABUTMENT



Ø	3,4	FRIPPR124
	3,8	FRIPPR113
	4,5	FRIPPR115

Vite di connessione inclusa anodizzata secondo codice colore
Connecting screw included anodized according to color code

MONCONE PROVVISORIO ROTANTE

TEMPORARY ROTATING ABUTMENT



Ø	3,4	FRIPPR125
	3,8	FRIPPR114
	4,5	FRIPPR116

Vite di connessione inclusa anodizzata secondo codice colore
Connecting screw included anodized according to color code

MONCONE TRASMUCOSO

TRANSMUCOSAL ABUTMENT



		H		
		1	2	3
Ø	3,4	FRIPPR041	FRIPPR003	FRIPPR042
	3,8	FRIPPR043	FRIPPR015	FRIPPR044
	4,5	FRIPPR045	FRIPPR025	FRIPPR046
	5,5	/	FRIPPR030	/

Componente anodizzato secondo codice colore
Anodized component according to color code
Vite di connessione inclusa
Connecting screw included

MONCONE FRESABILE

MILLABLE ABUTMENT



	3,4	FRIPPR004
	3,8	FRIPPR009
∅	4,5	FRIPPR020
	5,5	FRIPPR027

Componente anodizzato secondo codice colore

Anodized component according to color code

Vite di connessione inclusa

Connecting screw included

MONCONE ESTETICO INCLINATO 15°

15° ANGLED AESTHETIC ABUTMENT



		H	
		1	3
	3,4	FRIPPR036	FRIPPR123
	3,8	FRIPPR011	FRIPPR122
∅	4,5	FRIPPR022	/
	5,5	FRIPPR031	/

Componente anodizzato secondo codice colore

Anodized component according to color code

Vite di connessione inclusa

Connecting screw included

MONCONE ESTETICO INCLINATO 25°

25° ANGLED AESTHETIC ABUTMENT



		H	
		1	3
	3,4	FRIPPR139	FRIPPR140
∅	3,8	FRIPPR078	FRIPPR126

Componente anodizzato secondo codice colore

Anodized component according to color code

Vite di connessione inclusa

Connecting screw included

MONCONE TBase

TBase ABUTMENT

Ø	3,4	FRIPPR141
	3,8	FRIPPR099
	4,5	FRIPPR100



Componente anodizzato secondo codice colore
Anodized component according to color code

Vite di connessione inclusa
Connecting screw included

Fornito senza Scanbody. Per il rilevamento di posizione con scanner intraorale, il moncone TBase è compatibile con la misura Large degli Scanbody Sirona™ Cerec.

Scanbody not included. For digital impression with intraoral scanner, the TBase is compatible with Scanbody Sirona™ Cerec, size Large.

MONCONE SOVRAFUSIONE NON ROTANTE Cr/Co

NON ROTATING Cr/Co BASE CALCINABLE ABUTMENT

Ø	3,4	FRIPPR138
	3,8	FRIPPR090
	4,5	FRIPPR089



Vite di connessione inclusa anodizzata secondo codice colore
Connecting screw included anodized according to color code

MONCONE SOVRAFUSIONE ROTANTE Cr/Co

ROTATING Cr/Co BASE CALCINABLE ABUTMENT

Ø	3,4	FRIPPR137
	3,8	FRIPPR102
	4,5	FRIPPR104



Vite di connessione inclusa anodizzata secondo codice colore
Connecting screw included anodized according to color code

MONCONE CALCINABILE NON ROTANTE

CALCINABLE NON ROTATING ABUTMENT

Ø	3,4	FRIPPR035
	3,8	FRIPPR010
	4,5	FRIPPR018
	5,5	FRIPPR058



Vite di connessione inclusa
Connecting screw included

MONCONE CALCINABILE ROTANTE
CALCINABLE ROTATING ABUTMENT



	3,4	FRIPPR077
∅	3,8	FRIPPR037
	4,5	FRIPPR019

Vite di connessione inclusa
Connecting screw included

MONCONE A PALLINA (OTK)
BALL ABUTMENT (OTK)



		H		
		1	2	3
∅	3,4	FRIPPR109	FRIPPR110	FRIPPR111
	3,8	FRIPPR093	FRIPPR052	FRIPPR014
	4,5	/	FRIPPR023	FRIPPR024

Componente anodizzato secondo codice colore
Anodized component according to color code

CAPPETTA AMMORTIZZO BASSA APERTA IN
TITANIO CON O-RING
TITANIUM DAMPING CAP LOW, OPEN WITH O-RING

FRIPPR069



O-RING CONFEZIONE 10 PZ.
O-RING 10 PCS PACK

FRIPPR066


BARRETTA DI SALDATURA (10 PZ.)
WELDING BAR (10 PCS)



	1.2	VARPPR006
∅	1.5	VARPPR005
	2	VARPPR004


MUA (MULTI UNIT ABUTMENT) PER OVERDENTURE - POSIZIONAMENTO

MUA (MULTI UNIT ABUTMENT) FOR OVERDENTURE - POSITIONING

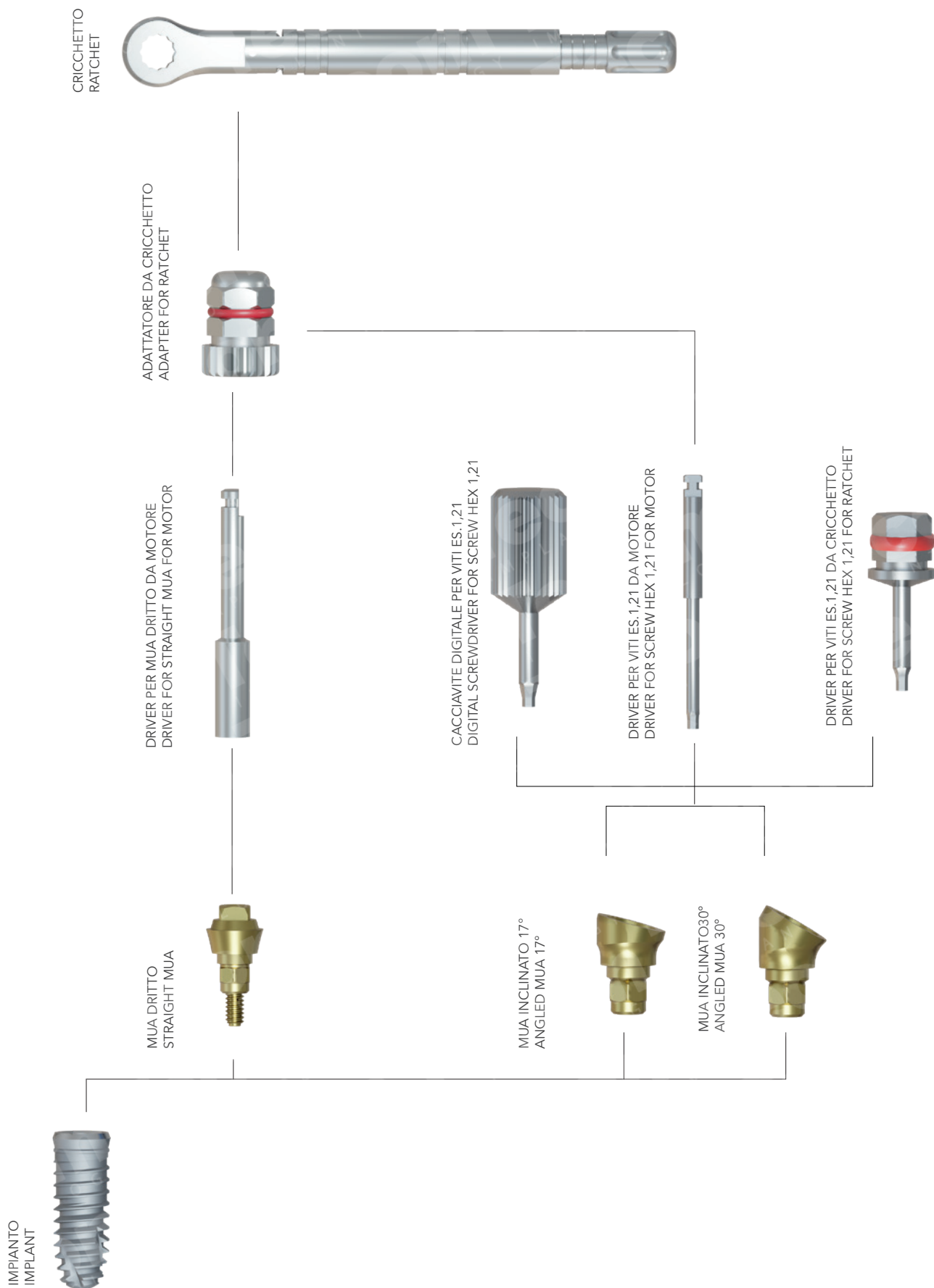


MUA PER OVERDENTURE - PRESA D'IMPRONTA

MUA FOR OVERDENTURE - IMPRESSION TAKING

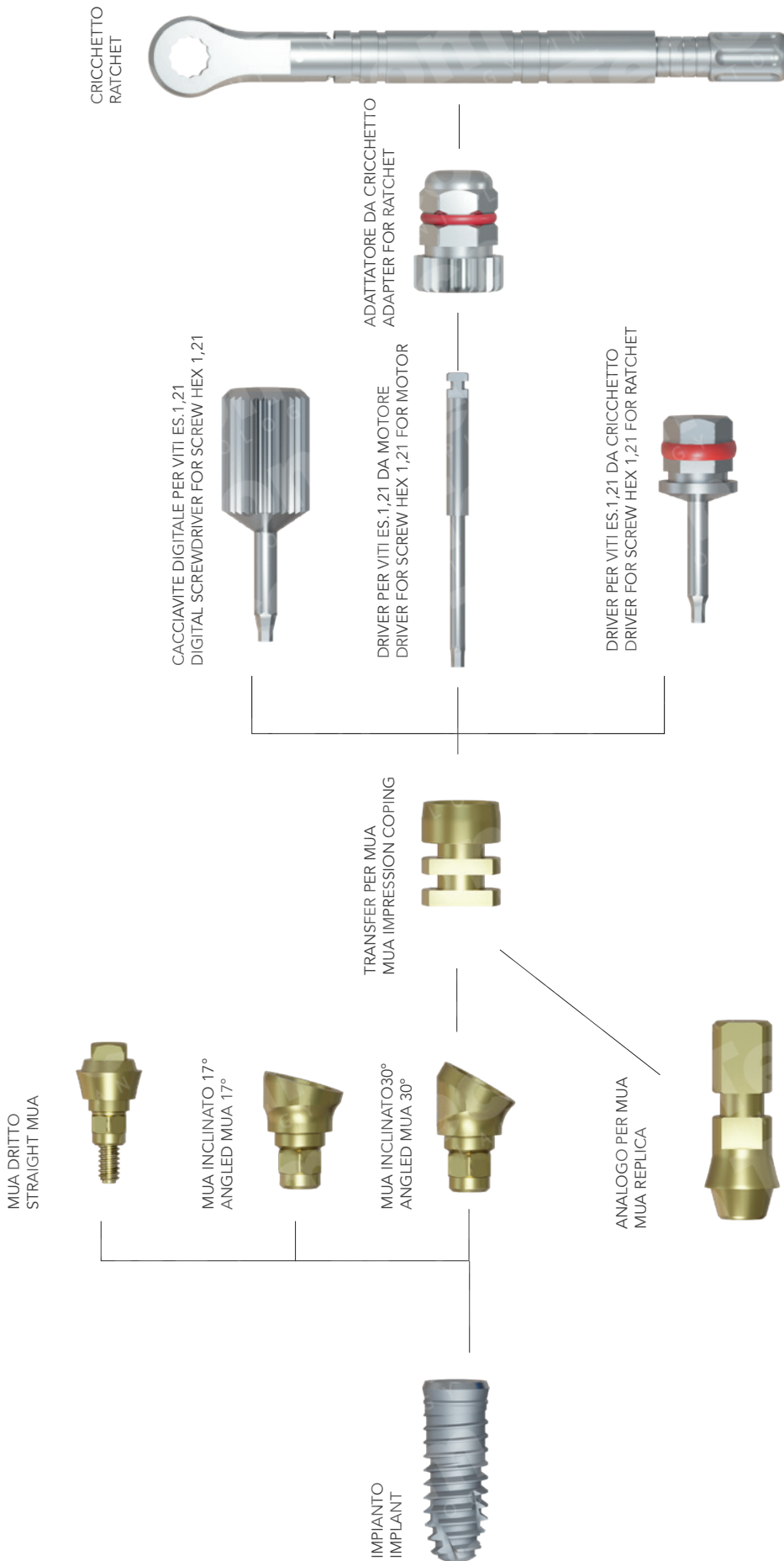

MUA PER OVERDENTURE - PROTESIZZAZIONE

MUA FOR OVERDENTURE - PROSTHETIC WORKFLOW

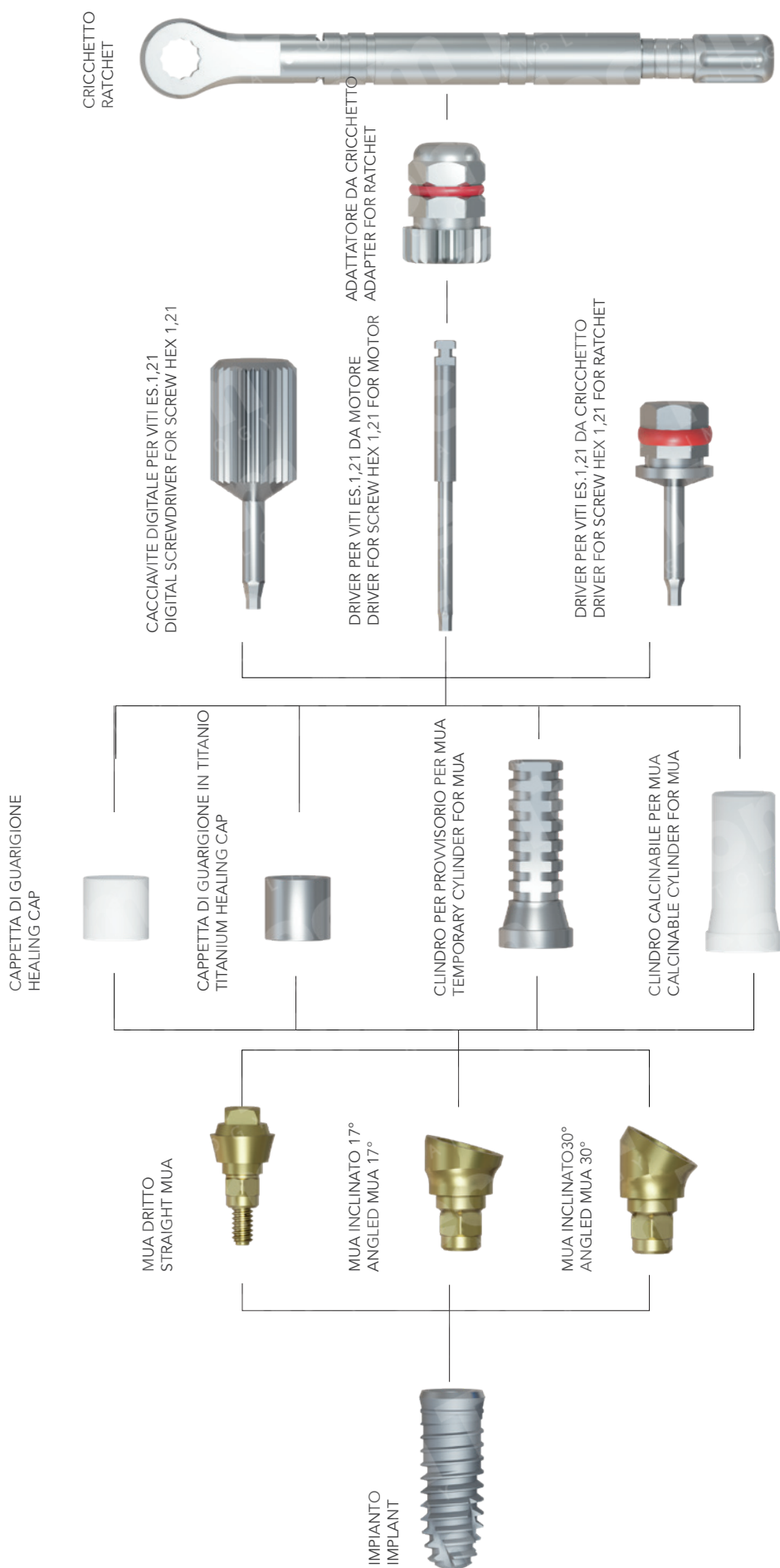

04 MUA MUA

MUA DRITTO STRAIGHT MUA



		H	
		1	2
Ø	3,4	FRIPPR055	FRIPPR054
	3,8	FRIPPR056	FRIPPR057
	4,5	FRIPPR060	FRIPPR059

Componente anodizzato secondo codice colore
Anodized component according to color code
Vite di connessione inclusa
Connecting screw included

MUA INCLINATO 15° 15° ANGLED MUA



		2	3	5
3,4	FRIPPR132	FRIPPR133	FRIPPR134	
3,8	FRIPPR085	FRIPPR086	/	
4,5	FRIPPR085	FRIPPR086	/	
5,5	FRIPPR085	FRIPPR086	/	

NEW

Vite di connessione inclusa, non intercambiabile con l'originale
Denstply XiVE®S
Connecting screw included, not interchangeable with original
Denstply XiVE®S
Componente anodizzato secondo codice colore
Anodized component according to color code
Utilizzare protesica MUA del Ø3,8 come l'originale
Use Ø3.8 MUA prosthesis like the original

MUA INCLINATO 30° 30° ANGLED MUA



		2	3
3,4	FRIPPR135	FRIPPR136	
3,8	FRIPPR087	FRIPPR088	
4,5	FRIPPR087	FRIPPR088	
5,5	FRIPPR087	FRIPPR088	

NEW

Vite di connessione inclusa, non intercambiabile con l'originale
Denstply XiVE®S
Connecting screw included, not interchangeable with original Den-
stply XiVE®S
Componente anodizzato secondo codice colore
Anodized component according to color code
Utilizzare protesica MUA del Ø3,8 come l'originale
Use Ø3.8 MUA prosthesis like the original

05 COMPONENTI DA LABORATORIO MUA MUA LAB COMPONENTS

TRANSFER OPEN TRAY PER MUA
MUA IMPRESSION COPING OPEN TRAY



	3,4	FRIPPR108
∅	3,8	FRIPPR092
	4,5	FRIPPR091

Componente anodizzato secondo codice colore
Anodized component according to color code

Vite di connessione inclusa
Connecting screw included

ANALOGO PER MUA
MUA REPLICA



	3,4	FRIPPR105
∅	3,8	FRIPPR106
	4,5	FRIPPR107

Componente anodizzato secondo codice colore
Anodized component according to color code

06 PARTI PROTESICHE MUA MUA PROSTHETIC PARTS

CAPPETTA CALCINABILE PER MUA
MUA CALCINABLE CAP



	3,4	FRIPPR062
∅	3,8	FRIPPR062
	4,5	FRIPPR061

Vite di connessione inclusa
Connecting screw included

CAPPETTA IN TITANIO PER MUA

MUA TITANIUM CAP



	3,4	FRIPPR070
∅	3,8	FRIPPR070
	4,5	FRIPPR073

Vite di connessione inclusa
Connecting screw included

BASE CALCINABILE PER MUA

MUA CALCINABLE BASE



	3,4	FRIPPR071
∅	3,8	FRIPPR071
	4,5	FRIPPR072

Vite di connessione inclusa
Connecting screw included

CILINDRO TITANIO PER MUA

MUA TITANIUM CYLINDER



	3,4	FRIPPR117
∅	3,8	FRIPPR117
	4,5	FRIPPR118

Vite di connessione inclusa
Connecting screw included

07 STRUMENTARIO TOOLS



FRESA LANCEOLATA
PRECISION DRILL

VARSTR084



FRESA PILOTA
PILOT DRILL

Ø reale fresa - Real Ø drill

	1,6	1,8	2
3,4	BRASTR032	BRASTR033	BRASTR034
3,8	BRASTR032	BRASTR033	BRASTR034
4,5	BRASTR032	BRASTR033	BRASTR034
5,5	BRASTR032	BRASTR033	BRASTR034



PIN DI PARALLELISMO
PARALLEL PIN

Ø

2/2,7

SF0STR122

Dotato di tacche di profondità per impianti H 6 - 8,5 - 10 - 11,5 - 13 - 15

Depth indicator for implants H 6 - 8,5 - 10 - 11,5 - 13 - 15



PROTOCOLLO DI FRESAGGIO
PER TUTTI I TIPI DI OSSO
DRILLING PROTOCOL FOR ALL BONES

Ø reale fresa - Real Ø drill

	3	3,4	4,2	5,2
3,4	FRISTR040	/	/	/
3,8	FRISTR040	FRISTR041	/	/
4,5	FRISTR040	FRISTR041	FRISTR042	/
5,5	FRISTR040	FRISTR041	FRISTR042	FRISTR048



IMPLANT DRIVER PER Ø 3,4 E PORTATORE DA MOTORE
 IMPLANT DRIVER FOR Ø 3,4 AND MOUNTER FOR MOTOR

L			
	8	13	
Ø	3,4	FRISTR059	FRISTR051

Dotato di O-Ring ritentivo ed esagono sul gambo
 With O-Ring and hexagon on the shank


IMPLANT DRIVER PER Ø 3,8/4,5/5,5 DA MOTORE
 IMPLANT DRIVER FOR Ø 3,8/4,5/5,5 FOR MOTOR



L			
	8	13	
Ø	3,8	FRISTR050	FRISTR058
	4,5	FRISTR050	FRISTR058
	5,5	FRISTR050	FRISTR058

Dotato di O-Ring ritentivo ed esagono sul gambo
 With O-Ring and hexagon on the shank

ADATTATORE DA CRICCHETTO PER IMPLANT DRIVER
 ADAPTER FOR RATCHET FOR IMPLANT DRIVER

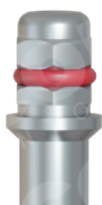

VARSTR086

Consente di utilizzare gli implant driver da motore con i cricchetti Titanmed
 This adapter allows to use the implant drivers for motor with Titanmed ratchets

IMPLANT DRIVER PER Ø 3,4 E PORTATORE DA CRICCHETTO
 IMPLANT DRIVER FOR Ø 3,4 AND MOUNTER FOR RATCHET



L			
	12	17	
Ø	3,4	PT.STR018	PT.STR019

Utilizzabile solo con cricchetti Titanmed
 It can be used only with Titanmed ratchets



IMPLANT DRIVER PER Ø 3,8/4,5/5,5 DA CRICCHETTO

IMPLANT DRIVER FOR Ø 3,8/4,5/5,5 FOR RATCHET

		L	
		12	17
Ø	3,8	PT.STR020	PT.STR021
	4,4	PT.STR020	PT.STR021
	5,5	PT.STR020	PT.STR021

Utilizzabile solo con cricchetti Titanmed
It can be used only with Titanmed ratchets



CACCIAVITE DIGITALE PER VITI ES. 1,21

DIGITAL SCREWDRIVER FOR SCREWS HEX. 1,21

		L	
		10	15
		FRISTR054	FRISTR053

DRIVER PER VITI ES. 1,21 DA MOTORE


DRIVER FOR SCREWS HEX. 1,21 FOR MOTOR



		L	
		26	32
		FRISTR052	FRISTR055

ADATTATORE DA CRICCHETTO PER DRIVER MOTORE

ADAPTER FOR RATCHET FOR MOTOR TOOLS

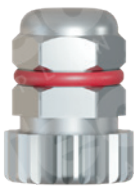

VARSTR020

Consente di utilizzare tutti i driver motore con i cricchetti Titanmed
This adapter allows to use all the drivers for motor with Titanmed ratchets



CACCIAVITE MANUALE PER STRUMENTI A CRICCHETTO

MANUAL SCREWDRIVER FOR RATCHETS INSTRUMENTS

		L
		170
		VARSTR085

Utilizzabile solo con driver Titanmed
It can be used only with Titanmed driver



DRIVER PER VITI ES. 1,21 DA CRICCHETTO
DRIVER FOR SCREWS HEX. 1,21 FOR RATCHET

L	
12	17
FRISTR056	FRISTR057

Utilizzabile solo con cricchetti Titanmed
It can be used only with Titanmed ratchets



DRIVER PER MUA DRITTO DA MOTORE
DRIVER FOR STRAIGHT MUA FOR MOTOR

L
25
FRISTR049



CRICCHETTO DINAMOMETRICO TITANMED
DYNAMOMETRIC TITANMED RATCHET

VARSTR053

Utilizzabile solo con driver Titanmed
It can be used only with Titanmed driver



CRICCHETTO FISSO TITANMED
FIXED TITANMED RATCHET

VARSTR069

Utilizzabile solo con driver Titanmed
It can be used only with Titanmed driver



PROLUNGA PER FRESE
DRILL EXTENDER

VARSTR032



CONTATTI

TITANMED S.r.l.

Sede amministrativa e operativa:
Via Piedimonte 8/B
23868 Valmadrera (LC) - Italia

Tel: 0039 0341 363504
Email: ordini@tecomimplantology.com

CONTACTS

TITANMED S.r.l.

Administrative and operational location:
Via Piedimonte 8/B
23868 Valmadrera (LC) - Italia

Tel: 0039 0341 363504
Email: orders@tecomimplantology.com

Titanmed

Leading to perfection

www.titanmed.it
www.tecomimplantology.com